

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'une ALÈZE et dans quel cas est-elle utilisée?
2. Comment utiliser l'ALÈZE?
3. Comment entretenir l'ALÈZE?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE ALÈZE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE?

L'ALÈZE est une protection destinée à prolonger la durée de vie de son matelas ou de ses fauteuils des fuites urinaires, de la transpiration ou des aléas du quotidien (le café au lit du dimanche matin...).

Elle peut être employée pour les animaux.

2. COMMENT UTILISER L'ALÈZE?

L'ALÈZE se pose sur le matelas et peut être maintenue à l'aide du drap housse ou elle se fixe par des sangles ou élastiques (non fournis) qui sont accrochés aux œillets.

3. COMMENT ENTRETENIR L'ALÈZE?

Le produit doit être nettoyé en cas de nécessité.

- A. Laver le produit à la main ou en machine, à l'eau tiède « 30° maximum », sans essorage.
- B. Laisser le produit sécher totalement à l'air libre. Ne pas mettre au sèche-linge.
- C. Une fois totalement sec, le produit peut être replacé.

4. MISES EN GARDE

- Ne jamais la faire bouillir.
- Ne pas repasser.
- Ne jamais mettre ce produit dans de l'eau de javel.
- Ne pas utiliser ce produit dans un autre emploi que celui pour lequel est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique, mais dans une benne de recyclage.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64