

### INFORMATIONS PRATIQUES

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.**

**Veillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'un BOCK DOUCHE et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Comment utiliser le BOCK DOUCHE ?
3. Comment entretenir et conserver le BOCK DOUCHE ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie
6. Informations supplémentaires.

#### **1. QU'EST-CE QU'UN BOCK DOUCHE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

LE BOCK DOUCHE est un produit dédié au lavement des parties intimes. Il permet d'améliorer l'hygiène au quotidien. Il est conçu pour un double usage (rectal et vaginal).

IL est composé d'un ensemble de pièces: un récipient de 2L, un tuyau de 1,5 m, une canule rectale, une canule vaginale, et un robinet.

Sur avis médical, ce produit peut être utilisé pour des lavements, des interventions pré ou post opératoires,...

Cette douche contribue à la toilette intime des personnes de tout âge.

**Le BOCK DOUCHE existe également en version voyage, avec un récipient souple et pliant.**

#### **2. COMMENT UTILISER LE BOCK DOUCHE?**

- A. Monter le robinet sur le tuyau.
- B. Monter la canule rectale ou vaginale sur le robinet.
- C. S'assurer que le robinet soit en position fermé.
- D. Remplir le récipient avec une solution liquide.
- E. Installer le bock douche à 1.50 mètre de hauteur par rapport à votre position.
- F. S'installer dans un endroit confortable: sur une serviette, une alèze; au sol; sur un lit; avec ou sans coussin; dans une baignoire, une douche,...
- G. Trouver la posture qui vous convient, adéquate à votre anatomie et la plus sécurisée.
- H. Introduire dans l'anus ou le vagin avec la canule appropriée.
- I. Ouvrir le robinet pour laisser le produit pénétrer.
- J. Attendre 1 minute environ avant de retirer la canule.
- K. Se rapprocher des toilettes afin d'évacuer le liquide introduit et rester le temps nécessaire à l'élimination totale de la solution.

#### **3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE BOCK DOUCHE ?**

Rincer séparément les éléments du BOCK DOUCHE à l'eau tiède avant le premier usage.

## LE KIT DOUCHE

Nettoie en douceur  
LE BOCK DOUCHE



Le produit doit être nettoyé après chaque emploi.

- Séparer les éléments qui constituent le BOCK DOUCHE.
- Laver les éléments (Récipient, canule, robinet, tuyau) à l'eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° ».
- Laisser les éléments sécher totalement à l'air libre.

Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- Remettre le produit dans son emballage.
- Ranger le produit dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

## 4. MISES EN GARDE

- Pour un liquide chaud, vérifier la température au creux du poignet.
- Ne pas mettre aux micro-ondes.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique, ce produit est recyclable.

## 5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après une première utilisation, consulter votre Pharmacien.

## 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS  
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)  
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

**Pour toute question sur ce produit, contactez :**

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

**MARVEL**

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

