



INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'un CRAYON HEMOSTATIQUE et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Comment utiliser le CRAYON HEMOSTATIQUE ?
3. Comment entretenir et conserver le CRAYON HEMOSTATIQUE ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UN CRAYON HÉMOSTATIQUE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le CRAYON HEMOSTATIQUE est un produit fabriqué à partir de la Pierre d'Alun qui est reconnue pour ses effets apaisants sur la peau.

Le CRAYON HEMOSTATIQUE est utilisé pour stopper les saignements des microcoupures.

Se raser tous les jours ou plusieurs fois par semaine fragilise la peau, ce qui la rend plus sensible lors de la coupe. Le feu de la lame peut provoquer l'apparition de boutons, rougeurs ou de microcoupures.

Facile à utiliser, il suffit de passer le bout du crayon sous l'eau et l'appliquer quelques secondes sur la zone cutanée qui saigne.

2. COMMENT UTILISER LE CRAYON HÉMOSTATIQUE ?

- A. Retirer le bouchon du crayon.
- B. Humidifier le bout du crayon avec un peu d'eau.
- C. Appliquer sur la microcoupure pendant quelques secondes.
- D. Refermer le produit après l'utilisation.

Attention ! Usage strictement personnel, afin d'éviter toute contamination par le sang.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE CRAYON HÉMOSTATIQUE ?

- A. Nettoyer le crayon à l'eau après chaque utilisation
- B. Secouer le crayon afin de l'égoutter, puis, si nécessaire, le sécher délicatement avec du papier absorbant.



LE CRAYON HÉMOSTATIQUE

Soulage les micro-coupures
Forme stick



- C. Bien refermer le produit après chaque utilisation.
- D. Stocker le produit dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser chez la femme enceinte, les enfants et les nourrissons.
- Ne pas avaler.
- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses, en cas de contact rincer immédiatement à l'eau, puis consulter un spécialiste.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ce produit est à jeter avec les ordures ménagères.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après une 1ère utilisation, consulter votre Pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est: Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

