

INFORMATIONS PRATIQUES

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.
Veuillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'une PINCE A ECHARDES et dans quel cas est-elle utilisée ?
2. Comment utiliser LA PINCE A ECHARDES ?
3. Comment entretenir et conserver LA PINCE A ECHARDES ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE PINCE A ECHARDES ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE ?

LA PINCE A ECHARDES permet d'extraire les corps étrangers incrustés sous la peau ou dans la chair, tel qu'une écharde, un dard, une épine ...à l'aide de ses pointes fines.
Elle est en acier inoxydable.

2. COMMENT UTILISER LA PINCE A ECHARDES ?

- A. Désinfecter la pince avant l'utilisation.
- B. Nettoyer la peau autour de l'écharde en évitant de l'enfoncer davantage.
- C. Retirer délicatement l'écharde avec la pince.
- D. Désinfecter la peau une fois l'écharde retirée.
- E. Désinfecter la pince immédiatement à la fin de l'opération.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LA PINCE A ECHARDES ?

La PINCE A ECHARDES doit être nettoyée avant et après chaque utilisation.

- A. Désinfecter la pince avec de l'alcool à 70°, ou avec une solution désinfectante équivalente.
- B. Essuyer la pince avec du papier absorbant.

LA PINCE A ECHARDES

Extrait épines et petits éclats
Inox - Effilée - 10 cm



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans son emballage d'origine.
- B. Ranger le produit dans un endroit propre et sec.

4. MISES EN GARDE

- En cas de difficultés à extraire l'écharde, ne pas insister et demander conseil à un professionnel de santé.
- Ne pas mettre aux micro-ondes.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser ce produit dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉ**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Mail : Service.conso@marvel.fr

Tel : 02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

