

LA POIRE A LAVEMENT

Nettoie en douceur

À canule en plastique – Poire en caoutchouc naturel



INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'une POIRE A LAVEMENT et dans quel cas est-elle utilisée ?
2. Comment utiliser la POIRE A LAVEMENT ?
3. Comment entretenir et conserver la POIRE A LAVEMENT ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE POIRE A LAVEMENT ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE ?

La POIRE A LAVEMENT est un produit dédié au lavement des parties intimes, il permet d'améliorer l'hygiène au quotidien, par exemple en cas de constipation ou de complication rectale (sur avis médical). Ce bain interne nettoie le colon et contribue à un meilleur mouvement intestinal.

La POIRE A LAVEMENT existe en 5 formats : 90 ML – 150 ML – 225 ML – 350 ML – 480 ML.

Poire sans latex et sans phtalate.

2. COMMENT UTILISER LA POIRE A LAVEMENT ?

- A. Monter la canule, si celle-ci est démontée, en l'introduisant délicatement dans la cavité de la poire.
- B. Comprimer complètement la Poire.
- C. Plonger la canule dans le liquide à absorber et relâcher la pression (voir mises en garde).
- D. S'installer dans un endroit confortable : sur une serviette, une alèze, au sol, sur un lit, avec ou sans coussin, dans une baignoire, une douche...
- E. Trouver la posture qui vous convient, adéquate à votre anatomie et la plus sécurisée.
- F. Introduire la canule dans l'anus (la lubrification préalable de la canule peut-être contre indiquée – (VOIR AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTE)).
- G. Comprimer la Poire complètement et en douceur pour injecter le liquide. Ne cesser cette pression qu'après avoir entièrement retiré la canule de votre fondement afin d'éviter d'aspirer le liquide injecté.
- H. En fonction de l'objectif de l'utilisation de la Poire, rapprochez-vous des toilettes afin d'évacuer le liquide introduit.

Ce produit est d'utilisation libre, et peut-être employé régulièrement.

Attention !!! Ne pas l'utiliser de manière excessive.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LA POIRE A LAVEMENT ?

Avant le premier usage, laver les éléments (poire et canule) à l'eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° ».

Rincer plusieurs fois.

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être



LA POIRE A LAVEMENT

Nettoie en douceur

À canule en plastique – Poire en caoutchouc naturel



Après chaque emploi, Le produit doit être nettoyé.

- Retirer la canule de la poire.
- Laver les éléments (poire et canule) à l'eau tiède « entre 20° et 25° » et savonneuse.
- Rincer plusieurs fois.
- Laisser les éléments sécher totalement à l'air libre.

Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- Remettre le produit dans sa boîte en carton.
- La ranger dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Ne pas mettre la Poire aux micro-ondes.
- La Poire et la canule ne sont pas autoclavables.
- Évaluer la température du liquide sur votre poignet avant l'introduction de la canule dans l'anus.
- Ne pas utiliser de corps gras, ni d'eau de javel, afin de ne pas détériorer le caoutchouc.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser ce produit dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries, ni aux sources de chaleur.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après une 1ere utilisation, consulter votre pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

