

INFORMATIONS PRATIQUES

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.
Veuillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce qu'une POIRE EFFILEE et dans quel cas est-elle utilisée?
2. Comment utiliser la POIRE EFFILEE?
3. Comment entretenir et conserver la POIRE EFFILEE?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE POIRE EFFILEE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE?

La POIRE EFFILEE est un produit dédié au lavement par liquide de l'oreille et du nez. Elle permet d'éliminer les bouchons de cérumen d'oreille ou de déboucher le nez.

Elle est constituée d'une Poire en caoutchouc avec une canule moulée à l'extrémité.

En cas de difficulté à extraire le cérumen, **ne pas insister**, il est indispensable de consulter un professionnel de santé.

La Poire existe en 5 formats : 30ml - 40ml - 75ml - 135ml - 200ml.

Produit sans latex et sans phtalate.

2. COMMENT UTILISER LA POIRE EFFILEE?

- A. Préparer une solution liquide dans un récipient ouvert (cuvette ou saladier).
- B. Plonger le bout de la Poire dans le liquide.
- C. Presser la Poire une fois pour pomper le liquide et relâcher la pression.
- D. Réchauffer le liquide en tenant la Poire entre les mains pendant quelques minutes, afin de limiter la sensation de liquide froid au moment de son introduction dans l'orifice.
- E. Introduire partiellement la canule effilée dans l'orifice.
- F. Presser la Poire progressivement pour injecter le liquide dans l'orifice auriculaire ou nasal.
- G. Relâcher la pression.
- H. Retirer la canule effilée pour laisser s'échapper la solution.
- I. Pencher la tête afin que l'excédent de liquide de lavement s'évacue du conduit de l'oreille

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LA POIRE EFFILEE?

Avant le premier usage, laver la Poire à l'eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° » et rincer plusieurs fois. Après chaque emploi, Le produit doit être nettoyé.

- A. Laver la Poire à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° ».

LA POIRE EFFILEE

Nettoie en douceur
Nez et Oreilles



B. Laisser la Poire sécher totalement à l'air libre, l'extrémité effilée vers le bas.

Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

A. Remettre le produit dans sa boîte en carton.

B. La ranger dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser de corps gras, ni d'eau de javel.
- Ne pas utiliser aux micro-ondes.
- Ne pas utiliser par une personne souffrante d'une perforation du tympan.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel elle est généralement destinée.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après la première utilisation, consulter votre Pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

