

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'une POIRE ENEMA et dans quel cas est-elle utilisée ?
2. Comment utiliser la POIRE ENEMA?
3. Comment entretenir et conserver la POIRE ENEMA?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE POIRE ENEMA ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE?

La POIRE ENEMA est un produit dédié au lavement par liquide de l'oreille et du nez.

Elle est constituée par une poire centrale et de deux tuyaux, ayant à leurs extrémités une canule effilée et une valve anti-retour.

Ce produit est livré avec deux canules effilées 60 mm et 70 mm.

Elle doit être utilisée par un professionnel de la santé.

Poire sans latex et sans phtalate.

2. COMMENT UTILISER LA POIRE ENEMA?

- A. Remplacer la canule effilée, si nécessaire.
- B. Préparer une solution liquide dans un récipient ouvert (cuvette ou saladier).
- C. Plonger la valve anti-retour dans le liquide.
- D. Presser la Poire une fois pour pomper le liquide et relâcher la pression.
- E. Introduire partiellement la canule effilée dans l'orifice.
- F. Appuyer sur la poire pour injecter le liquide dans l'orifice.
- G. Relâcher la pression.
- H. Retirer la canule effilée pour laisser s'échapper la solution.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LA POIRE ENEMA?

Avant le premier usage, laver les éléments (poire et canule) à l'eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° ».

Rincer plusieurs fois.

Après chaque emploi, Le produit doit être nettoyé.

- A. Retirer la Poire et la canule.
- B. Laver les éléments (poire et canule) à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° ».
- C. Rincer plusieurs fois.

LA POIRE ENEMA

Nettoie en douceur
Kit complet – Nez et Oreilles



D. Laisser les éléments sécher totalement à l'air libre.

Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans sa boîte en carton.
- B. La ranger dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser de corps gras, ni d'eau de javel.
- Ne pas utiliser aux micro-ondes.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après la première utilisation, consulter votre Pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

