

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'une POIRE DE POLIZER et dans quel cas est-elle utilisée ?
2. Comment utiliser LA POIRE DE POLIZER?
3. Comment entretenir et conserver la POIRE DE POLIZER?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE POIRE DE POLIZER ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE?

La POIRE DE POLIZER est utilisée pour insufflation nasale ou auriculaire et l'aération de la caisse du tympan en cas de bouchon de cérumen ou du nez bouché.

D'une contenance d'environ de 235 ml, la POIRE DE POLIZER est équipée d'un raccord prolongé par un tube en caoutchouc d'environ 20cm et terminé par canule nasale en plastique.

Il est recommandable qu'elle soit utilisée par un professionnel de santé.

Poire sans latex et sans Phtalate.

2. COMMENT UTILISER LA POIRE DE POLIZER?

- A. Introduire la canule dans l'orifice de l'oreille ou le nez.
- B. Faire prononcer le mot « HOUK » à l'utilisateur afin de relever le voile du palais au moment d'injection d'air.
- C. Presser délicatement la poire, l'air est alors insufflé dans l'orifice.
- D. Relâcher progressivement la pression effectuée sur la poire pour permettre la montée du liquide.
- E. Refaire l'opération plusieurs fois si c'est nécessaire.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LA POIRE DE POLIZER?

Avant le premier usage, laver l'ensemble des éléments à l'eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° ». Rincer plusieurs fois.

Après chaque emploi, Le produit doit être nettoyé.

- A. Laver les éléments (poire, raccord, tube et canule) à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° ».
- B. Rincer plusieurs fois.
- C. Laisser les éléments sécher totalement à l'air libre.

LA POIRE DE POLITZER

Insufflé l'air en douceur
Kit complet – nez et oreilles



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans sa boîte en carton.
- B. La ranger dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser de corps gras, ni d'eau de javel.
- Ne pas utiliser aux micro-ondes.
- La Poire et la canule ne sont pas autoclavables.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après une 1ere utilisation, consulter votre Pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

