

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'un TIRE-LAIT A POIRE et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Comment utiliser LE TIRE-LAIT A POIRE?
3. Comment entretenir et conserver LE TIRE-LAIT A POIRE?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UN TIRE-LAIT A POIRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le TIRE-LAIT A POIRE est un produit qui permet d'extraire le lait en douceur directement à partir du sein de la maman, en cas de congestion.

2. COMMENT UTILISER LE TIRE-LAIT A POIRE ?

- A. Se laver soigneusement les mains ainsi que le sein.
- B. A l'aide d'une lingette appropriée, nettoyer les bords internes et externes du TIRE-LAIT.
- C. Nettoyer le mamelon et l'aréole avec une nouvelle lingette.
- D. Placer le TIRE-LAIT sur le sein en positionnant le réservoir (partie bombée) vers le bas.
- E. Pomper avec la Poire pour aspirer le lait (s'arrêter avant que le lait atteigne la Poire).
- F. Jeter le lait car il est impropre à la consommation.
- G. Rincer le TIRE-LAIT à l'eau froide à la fin de l'opération.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE TIRE-LAIT A POIRE ?

Avant le premier usage, laver les éléments (Poire et réservoir) à l'eau tiède savonneuse «entre 20° et 25°».

Après chaque emploi, Le produit doit être nettoyé.

- A. Retirer la Poire du réservoir.
- B. Laver les éléments (Poire et réservoir) à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° ».
- C. Rincer plusieurs fois.
- D. Laisser les éléments sécher totalement à l'air libre

LE TIRE-LAIT A POIRE

Facilite l'allaitement
Manuel – Atmosphérique



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans sa boîte en carton.
- B. La ranger dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Le lait recueilli doit être jeté, car il est chargé de microbes et devient impropre à la consommation.
- Ne pas utiliser aux micro-ondes
- Ne pas utiliser de corps gras, ni d'eau de javel pour le nettoyage.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'as pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après la première utilisation, consulter votre Pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez :

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

