



**Diabète**



**Allergies**

## **POCHETTE ISOTHERME POUR INSULINE\* ET MEDICAMENTS\* CONTRE LES ALLERGIES**

- ✓ **Garde vos médicaments\* au frais**
- ✓ **Grande pochette**
- ✓ **Peut contenir 5 stylos**



**Recommandé  
par  
les praticiens  
de santé**

**Idéal pour les  
voyages,  
les vacances et  
l'utilisation  
quotidienne**

**Facile à activer  
Par simple  
immersion dans  
de l'eau fraîche**

**Garde les  
médicaments\* au  
frais et en toute  
sécurité pendant  
45 heures**

# INSTRUCTIONS

La pochette isotherme FRIO a été spécialement conçue pour maintenir les médicaments\* au frais, à une température ambiante de 18 à 26 ° C pendant 45 heures minimum, même à une température constante de 37,8 ° C.

Les pochettes isothermes FRIO sont réutilisables, elles peuvent être réactivées pour des périodes consécutives de 45 heures de conservation des médicaments\*.


La pochette isotherme FRIO se compose de deux parties: l'élément intérieur en polycoton, contenant des cristaux (non toxiques et ininflammables), qui nécessite une activation avec de l'eau.

L'élément extérieur en Cambrelle® qui permet de protéger la pochette interne.

## COMMENT L'UTILISER

### 1.A Première utilisation:


Plonger l'élément intérieur contenant les cristaux dans l'eau froide et laisser tremper pendant 14-18 minutes.

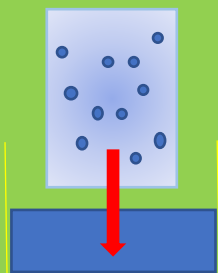

14-18 minutes

### 1.B Pour une utilisation continue: (Réaction des cristaux)

Plonger l'élément intérieur à nouveau pendant 2-4 minutes. Manipuler la pochette pour étaler les cristaux dans les panneaux.

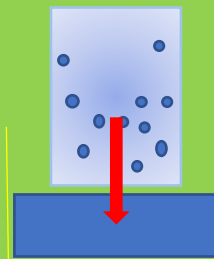


2-4 minutes

2

Essuyer délicatement et laisser sécher la pochette pendant 5 minutes, ce qui permet aux cristaux d'absorber l'excès d'eau.




5 minutes

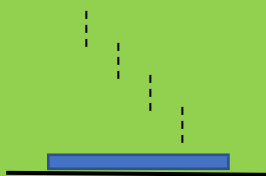

3

Quand il est à moitié-sec au toucher, placer l'élément intérieur dans sa couverture extérieure.

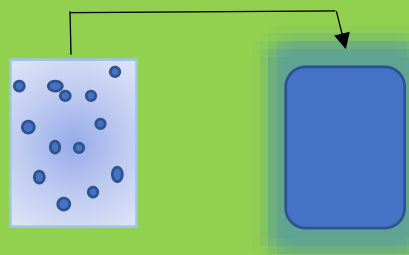

Transporter la pochette dans un bagage à main ou dans votre poche est approprié.

\*Les médicaments doivent être maintenus à la température sécuritaire recommandée.

Consultez les instructions de conservation de votre médicament sur la notice du fabricant, pour vous assurer qu'il est approprié pour une conservation dans une pochette isotherme FRIO.

## SECHAGE ET NETTOYAGE


Lorsque vous n'utilisez plus la pochette, retirer l'élément intérieur et laisser le sécher complètement jusqu'au retour à sa forme cristalline.

Pour accélérer le séchage, placer l'élément intérieur près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, sur une étagère ouverte ou sur un rebord de fenêtre exposé au soleil.

Le secouer à intervalles réguliers pour étaler les cristaux pour une activation future plus facile.

L'élément intérieur peut être nettoyé à l'aide d'une brosse à poils doux et en utilisant un produit antibactérien sans javel.

L'élément extérieur peut être lavé à la main, avec de l'eau chaude en utilisant un détergent doux.

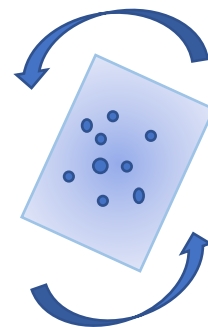

## PRECAUTIONS

- Ne pas transporter ou entreposer dans un contenant étanche lorsqu'elle est activée
- Ne pas transporter ou entreposer dans un contenant hermétique lorsqu'elle est activée
- Ne pas placer dans un sac isotherme ou fermé afin de ne pas gêner l'évaporation
- Ne pas mettre au réfrigérateur ni au congélateur
- Ne pas placer dans un four à micro-ondes ou un four
- Ne pas placer dans le sèche-linge ou la machine à laver
- Ne pas utiliser la pochette et la remplacer lorsque les cristaux ne se transforment plus

**La première pochette isotherme de médicaments\* brevetée au monde, indispensable pour les personnes en déplacement!**

- Garde les médicaments\* au frais et en toute sécurité.
- Activation de l'eau seulement – réutilisable.
- Reste actif pendant 45 heures minimum.
- Pas de packs de glace ou de réfrigération nécessaire.
- Idéal pour un usage quotidien.

**Produit distribué par Marvel :**



**SPECIALISTE D'ARTICLES ET D'ACCESSOIRES DU QUOTIDIEN, D'HYGIENE ET DE BIEN-ETRE, INSPIRES DES PRATIQUES DES GENERATIONS PRECEDENTES**

Vous retrouverez toute notre gamme de produits sur notre site internet :

**[www.marvel.fr](http://www.marvel.fr)**

Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter :

Marvel SARL

100 Rue de la Halte  
45770 Saran

+33 (0)2 38 86 04 64

+33 (0)2 38 86 41 67

service-conso@marvel.fr