

**INFORMATIONS PRATIQUES**

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.  
Veuillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu'un SERRE-POIGNET et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Comment utiliser le SERRE-POIGNET ?
3. Comment entretenir et conserver le SERRE-POIGNET ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QU'UN SERRE POIGNET ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Le SERRE-POIGNET est en cuir doublé de feutrine et s'utilise lors de séquelles ou de traumatisme, en prévention de récurrences.

Il se positionne autour du poignet en serrant le bracelet. Il apporte une sensation de maintien et de soulagement.

**Existe en 3 tailles : S: 6x18 - M: 6x21 - L: 6x23**

**2. COMMENT UTILISER LE SERRE POIGNET ?**

- A. Nettoyer le poignet.
- B. Placer le SERRE-POIGNET autour du poignet.
- C. Serrer LE SERRE-POIGNET de manière à bien maintenir le poignet tout en restant confortable.

**3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE SERRE POIGNET ?**

Le produit doit être nettoyé occasionnellement.

- A. Nettoyer la partie en cuir avec un chiffon doux et un produit pour le cuir.
- B. Laisser le produit sécher à l'air libre.

## LE SERRE POIGNET

Maintient et soulage

Cuir – Feutrine



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans sa boîte.
- B. Ranger le produit dans un endroit propre et sec à température ambiante.

### 4. MISES EN GARDE

- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas serrer trop fortement.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- A jeter avec les ordures ménagères.

### 5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS  
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)  
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

**Pour toute question sur ce produit, contactez:**

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

**MARVEL**

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

