



INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'un VERRE À BOIRE et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Comment utiliser le VERRE À BOIRE ?
3. Comment entretenir et conserver le VERRE À BOIRE?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UN VERRE À BOIRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le VERRE À BOIRE permet d'ingérer sans renverser une boisson, chaude ou froide, grâce à son couvercle bec de canard.

Il est très utile pour les personnes alitées ou ayant des difficultés de préhension. Le bec permet à la personne de boire sans effort ou de recevoir à boire sans verser.

Plus globalement, pour les personnes qui souhaitent profiter de leur boisson dans un environnement qui présente des vibrations, etc.

COMMENT UTILISER LE VERRE À BOIRE?

- A. Retirer la partie supérieure du verre à boire et remplir le verre.
- B. Vérifier que l'orifice du bec est bien propre.
- C. Refermer le couvercle et vérifier que celui-ci est bien enfoncé.
- D. Boire en toute sécurité.

2. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE VERRE À BOIRE?

Avant le premier usage, laver les éléments (verre et couvercle) à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° ». Rincer plusieurs fois.

Après chaque emploi, Le produit doit être nettoyé

- A. Retirer le couvercle.
- B. Laver les éléments (verre et couvercle) à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° ».
- C. Positionner les éléments sur du papier absorbant, avec les ouvertures vers le bas
- D. Laisser les éléments sécher totalement à l'air libre.



LE VERRE À BOIRE

Facilite le quotidien
Avec couvercle bec de canard



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans sa boîte en carton.
- B. Le ranger dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

3. MISES EN GARDE

- Lavable au lave-vaisselle.
- Ne pas mettre aux micro-ondes.
- Ne pas exposer ce produit au soleil.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique, mais à mettre dans une benne de recyclage.

4. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

