

INFORMATIONS PRATIQUES

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.
Veuillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'une VESSIE A GLACE et dans quel cas est-elle utilisée ?
2. Comment utiliser la VESSIE A GLACE ?
3. Comment entretenir et conserver la VESSIE A GLACE ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE VESSIE À GLACE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE ?

La VESSIE A GLACE est une poche en caoutchouc, avec un bouchon étanche et une jupe rabattable. Elle permet de soulager les douleurs, les hématomes, et les maux de tête, soit par le froid, soit par le chaud, en l'appliquant sur l'endroit à traiter.

2. COMMENT UTILISER LA VESSIE À GLACE ?

- A. Remplir à moitié la VESSIE A GLACE de : Eau glacée - Glaçons - Eau chaude.
- B. Refermer avec le bouchon en prenant soin de rabattre la jupe.
- C. Essuyer la Vessie.
- D. Vérifier la bonne étanchéité du bouchon en retournant la Vessie.
- E. Appliquer la Vessie sur la partie à soulager (Si nécessaire, utiliser un morceau de tissu en protection de la peau).

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LA VESSIE À GLACE ?

Le produit doit être nettoyé après chaque emploi.

- A. Rincer la vessie à l'eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° ».
- B. Laisser le produit sécher totalement à l'air libre.

LA VESSIE à GLACE

Soulage par le froid
Caoutchouc



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans sa boîte.
- B. Ranger le produit dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Ne pas stériliser aux micro-ondes.
- Ne pas utiliser de corps gras, ni d'eau de javel concentrée.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez :

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

